

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВРАЧА В СИСТЕМЕ

1.1. Установка десктоп-приложения

Для корректной работы приложения необходима подключённая к персональному компьютеру веб-камера с минимальным разрешением 1280 x 720 пикселей и монитор с разрешением экрана $\geq 1920 \times 1080$ пикселей.

Установка приложения происходит посредством извлечения файлов из предоставленного архива любым доступным архиватором (пример - «WinRAR», «7-Zip»). Путь до папки с извлечёнными файлами не должен содержать символов кириллицы. Пример корректного пути - «C:\Program Files\Looper».

После извлечения из архива приложение будет доступно для запуска из папки с извлечённым приложением.

Для запуска приложения необходимо 2 раза нажать на исполняемый файл «Looper.exe» в папке приложения. Первый запуск приложения может занять до 30 секунд.

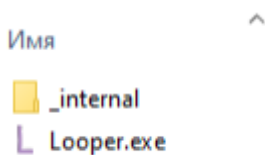


Рисунок 1 – Исполняемый файл приложения

При первом запуске приложения откроется окно ввода ключа активации, в которое необходимо ввести предоставленный ключ.

После входа в приложение откроется окно авторизации, в котором будет предложено ввести ФИО и пароль нового пользователя.

После авторизации откроется стандартный интерфейс приложения.


1.2. Вход в систему

Для входа в систему необходимо открыть приложение на рабочем столе 2 раза



нажать на ярлык приложения


Откроется приложение «Синерис».

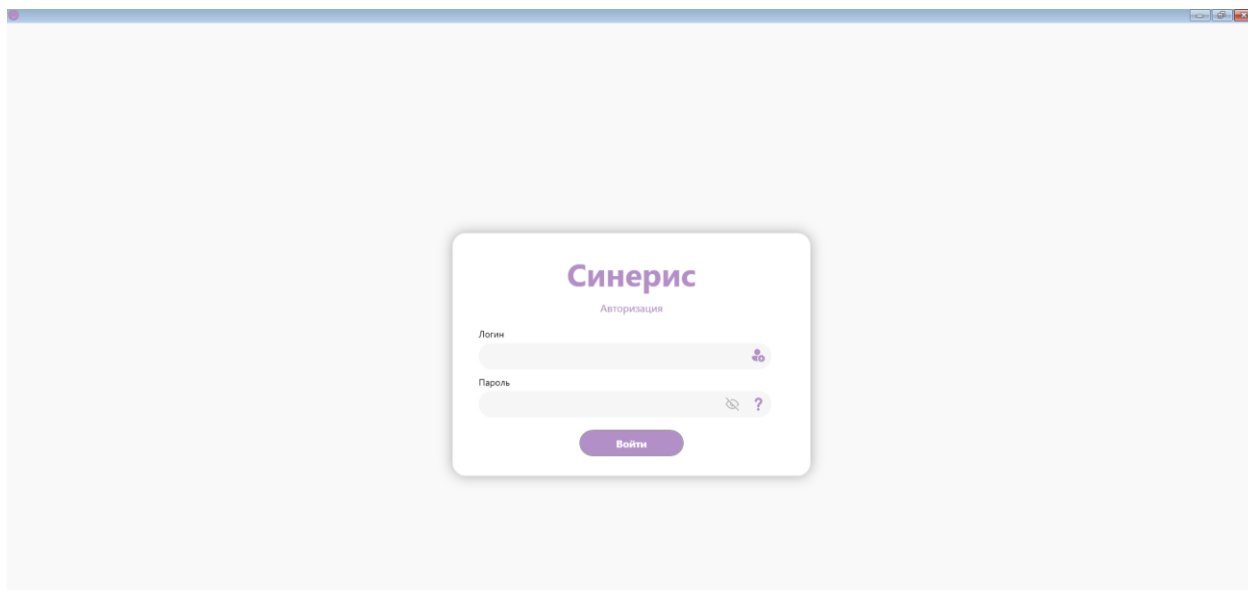

В открывшемся окне «Авторизация» есть возможность:


1.2.1. Вход в существующий аккаунт:

- 1.1. Необходимо заполнить свой логин в поле «Логин» (1).
- 1.2. Необходимо ввести пароль в поле «Пароль» (2).
- 1.3. После заполнения необходимых полей для входа в систему необходимо нажать «Войти» (3).

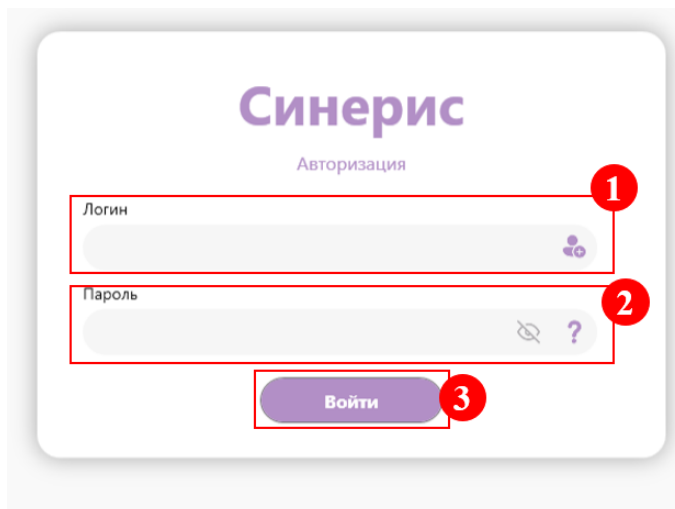


2. Регистрация.

2.1. Если у врача нет аккаунта, необходимо нажать «+» (1).

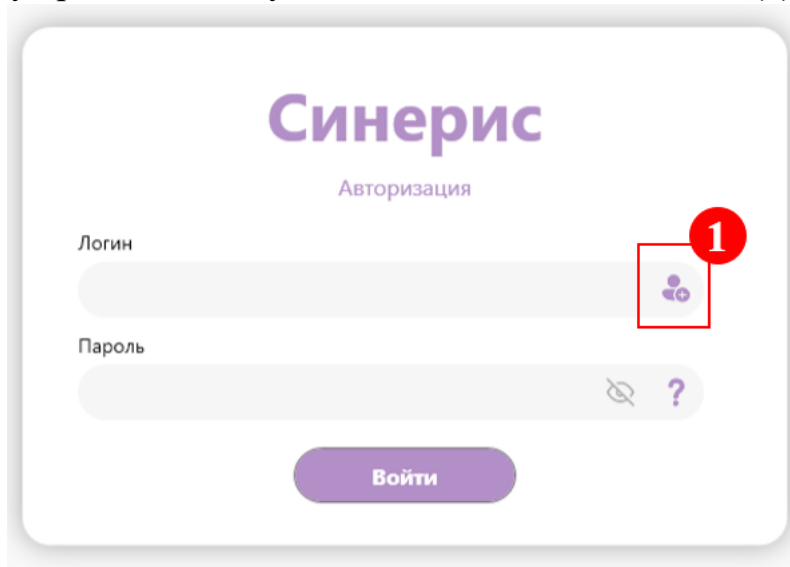

В открывшемся окне необходимо заполнить личные данные:



- Логин (2);
- ФИО (3);
- Почта (4);
- Пароль (5);
- Выбрать роль: Врач (6);
- Кнопка «Зарегистрироваться» (7).

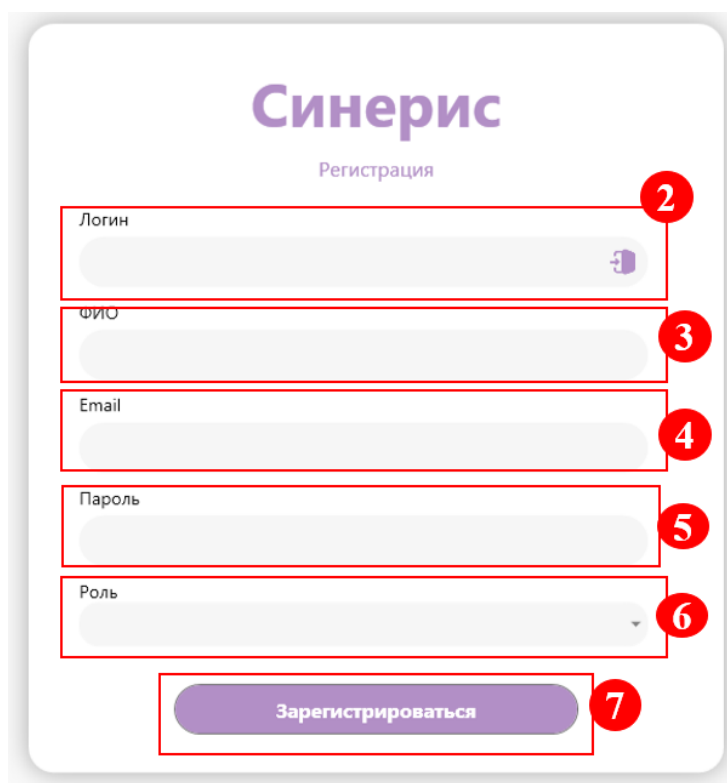

2.2. Личный кабинет врача


В личном кабинете врача отображается в правом верхнем углу (1), можно **изменить свои данные** (2)

Для выхода из системы в правом верхнем углу необходимо нажать **«Выход»** (3).

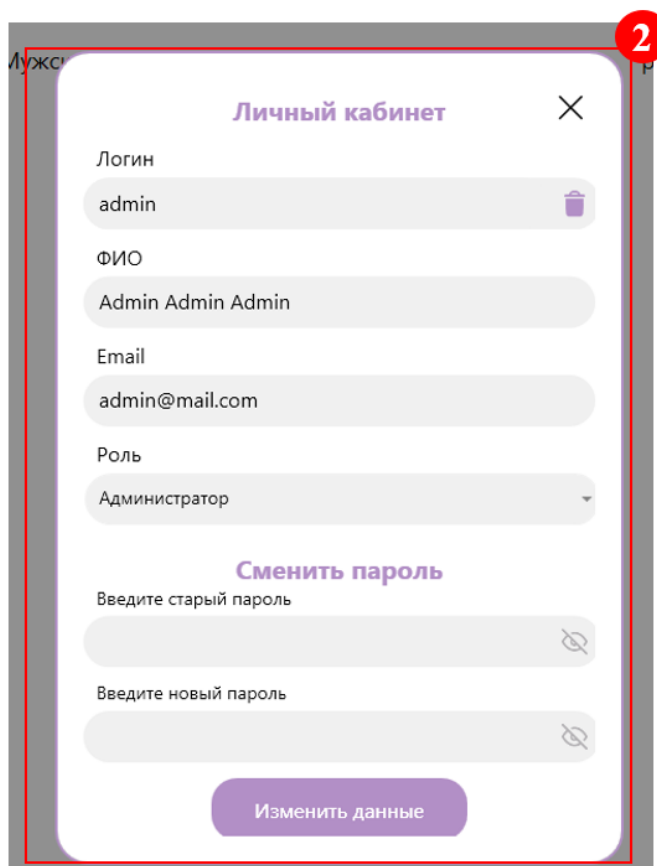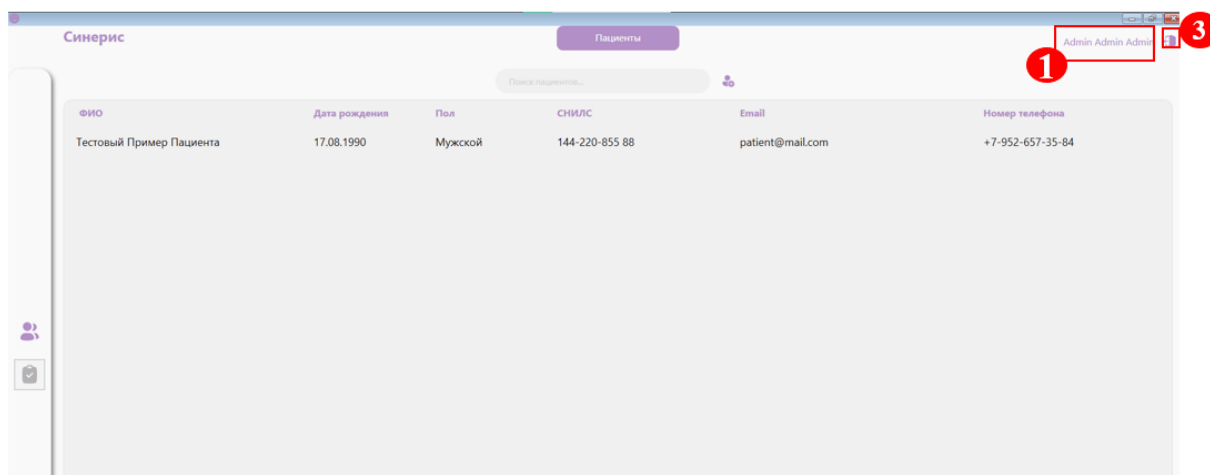


2.3. Пациенты

На **Главной**, представлен **список (2)** всех пациентов, прикрепленных к врачу.

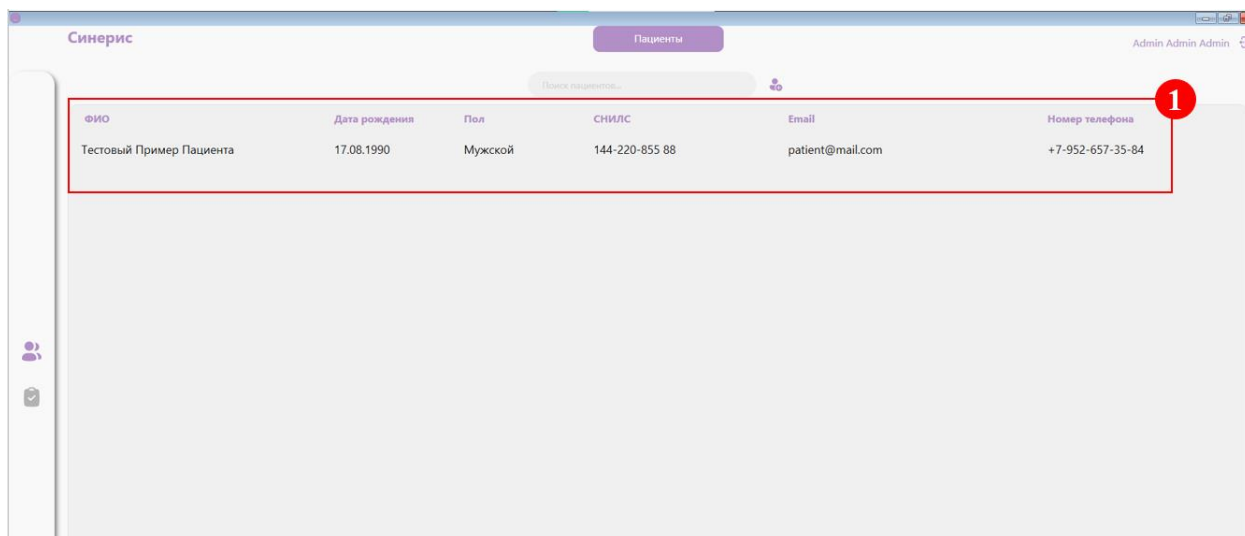

2.3.1. Добавить пользователя

Для добавления нового пациента нажмите на значок «+» (1).

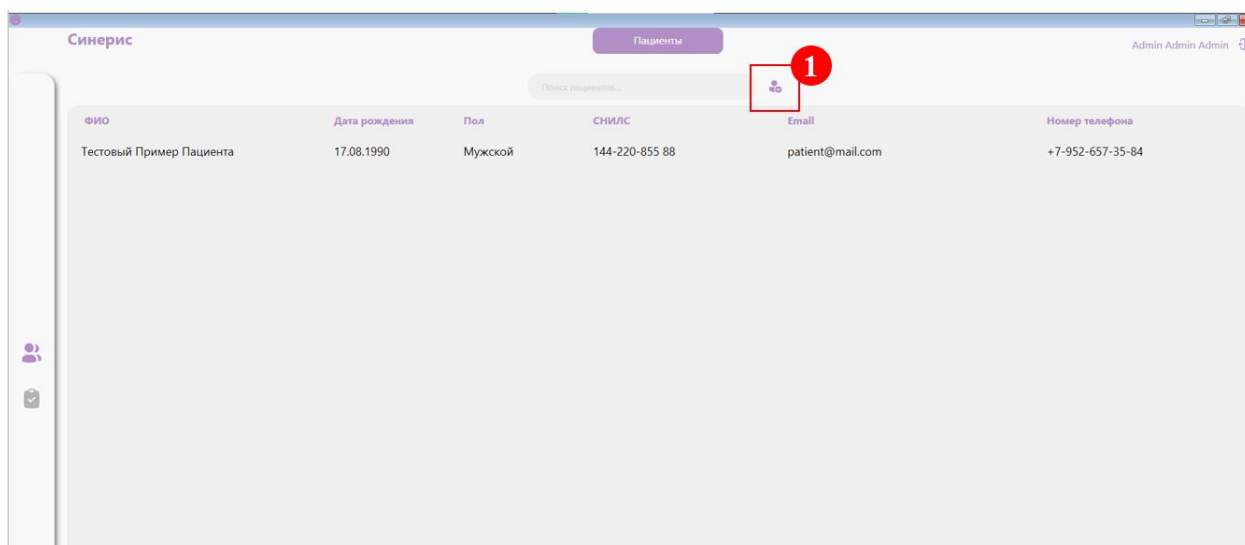

В открывшемся окне введите данные пациента:

- ФИО (2);
- Дату рождения (3);
- Выберите пол (4);
- Введите СНИЛС (5);
- Номер телефона (6);
- Email (7);
- и нажать кнопку **добавить (8)**.

Добавить пациента

ФИО

Дата рождения

Пол ☐ Женский ☐ Мужской

СНИЛС
__*** **

Номер телефона
+7 (***) ***_**_**

Email


Добавить

После добавления система автоматически добавляет нового пользователя (9):

ФИО	Дата рождения	Пол	СНИЛС	Email	Номер телефона
Тестовый Пример Пациента	17.08.1990	Мужской	144-220-855 88	patient@mail.com	+7-952-657-35-84


3. Сеансы

Для начала тестирования пациента, нажмите на выбранного **пациента (1)**.

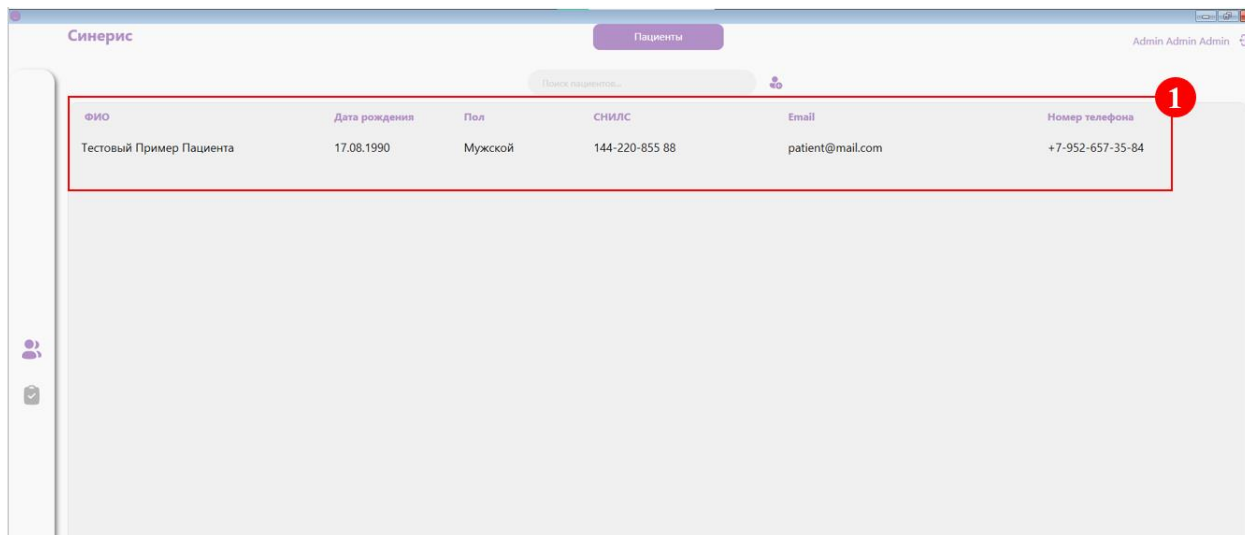



В открывшемся окне располагаются:

- Карточка пациента **(2)**;
- Сеансы (видеосеанс/аудиосеанс/тестирование) **(3)**;
- Добавить видео **(4)**;
- Добавить аудио **(5)**.

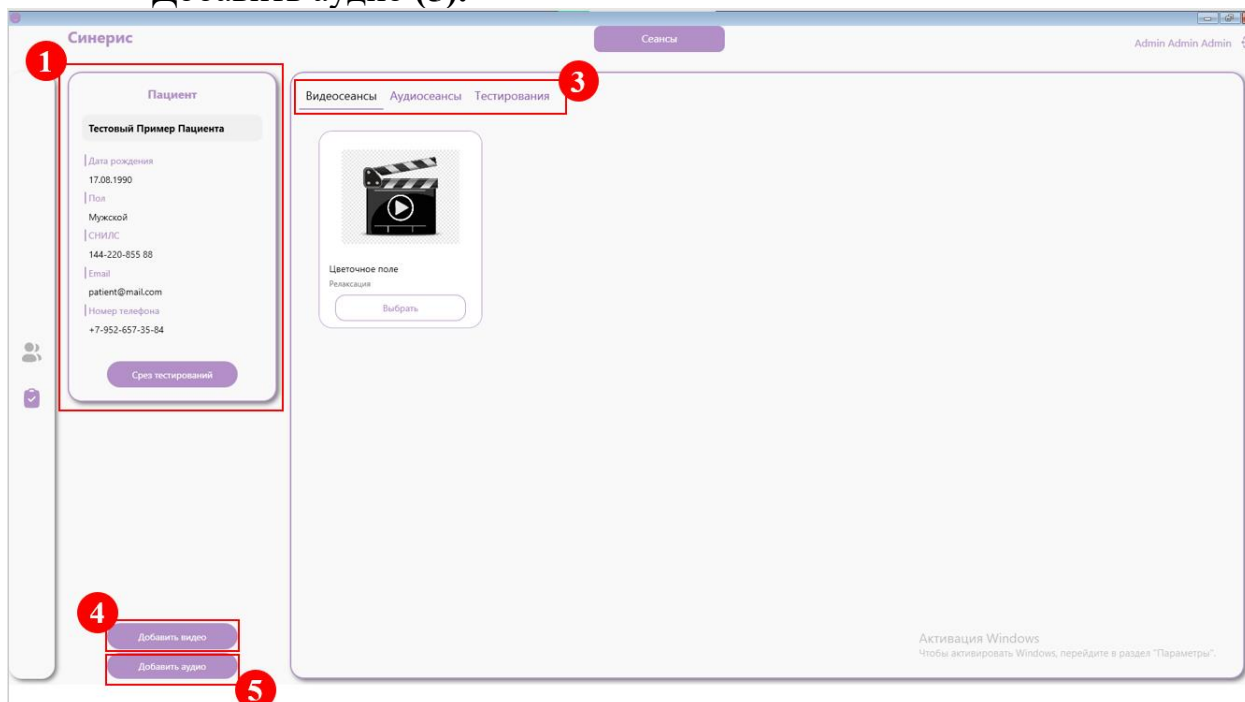

3.1. Видеосеанс

Для прохождения видеосеанса пациентом необходимо выбрать вкладку «Видеосеансы» (1), затем нажать кнопку «Выбрать» (2) на карточке необходимого видео, далее нажать кнопку «Начать сеанс» (3).

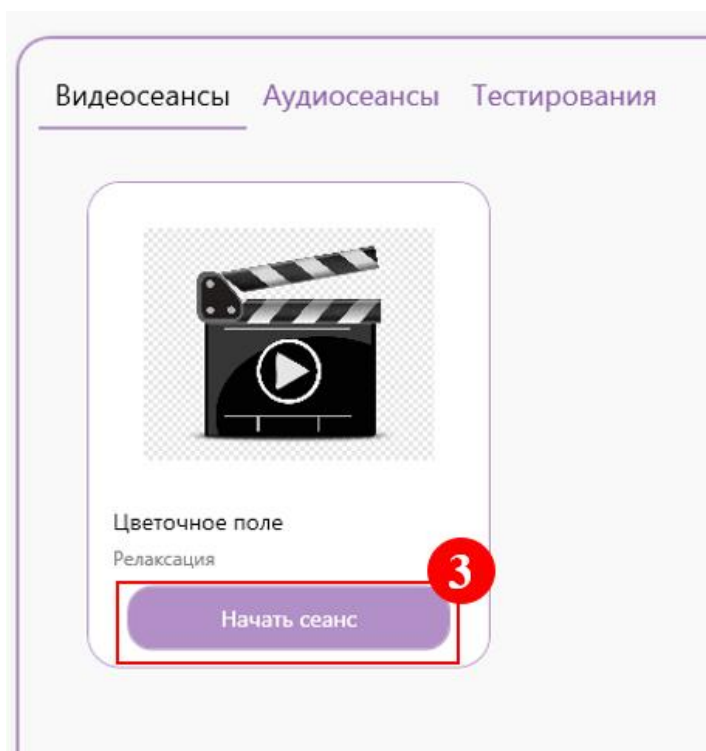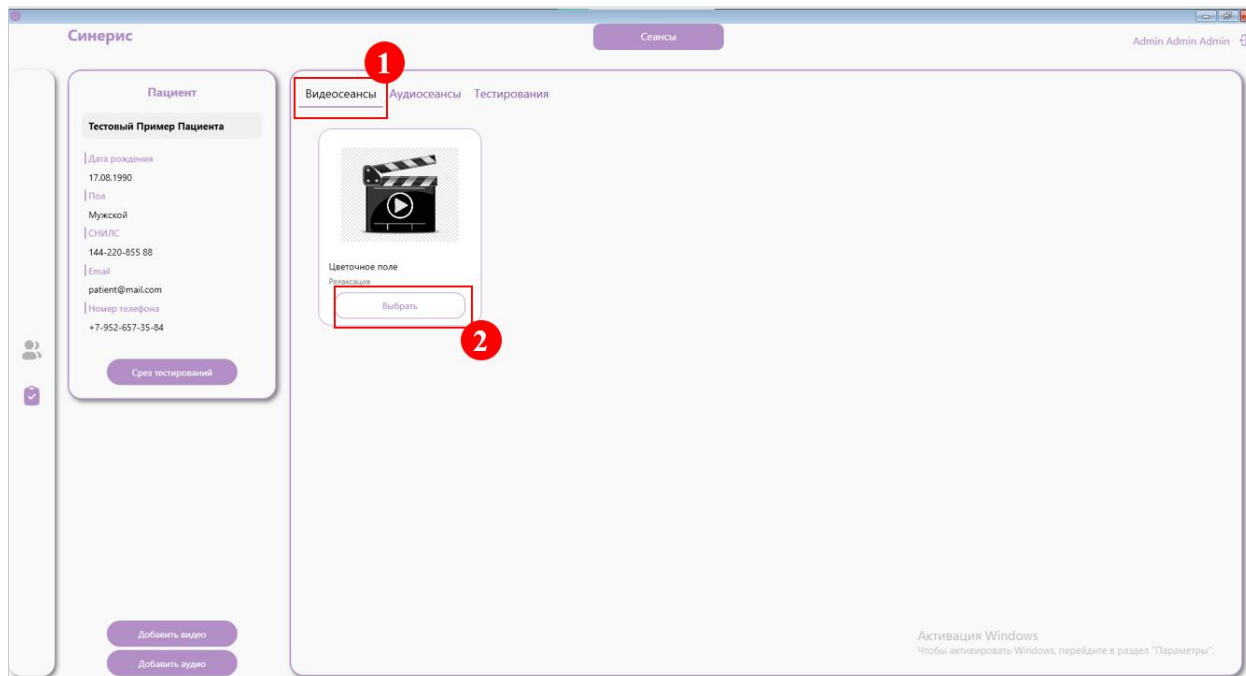

В открывшемся окне «Оценка состояния», выставите каждый ползунок эмоциональное состояние пациента (4) в нужном месте, далее подключите

пульсометр через Bluetooth, нажав на кнопку «Bluetooth» (5). Нажмите на кнопку «Начать тестирование» (6).

Оценка состояния

Удовлетворенность здоровьем

Настроение

Самочувствие

Работоспособность


Подключить Bluetooth

Начать тестирование


3.1.1. Тестирование пациента

В начале тестирования открывается окно **видеосеанса**. В открывшемся окне располагается:


- Видео (1);
- Круговая диаграмма эмоционального состояния во время просмотра видео (2);
- Результаты распознавания эмоционального состояния по цветам (3);
- Длительность видео (4);
- Кнопка «Завершить тестирование» (5);
- Кнопка «Ожидайте» (6).

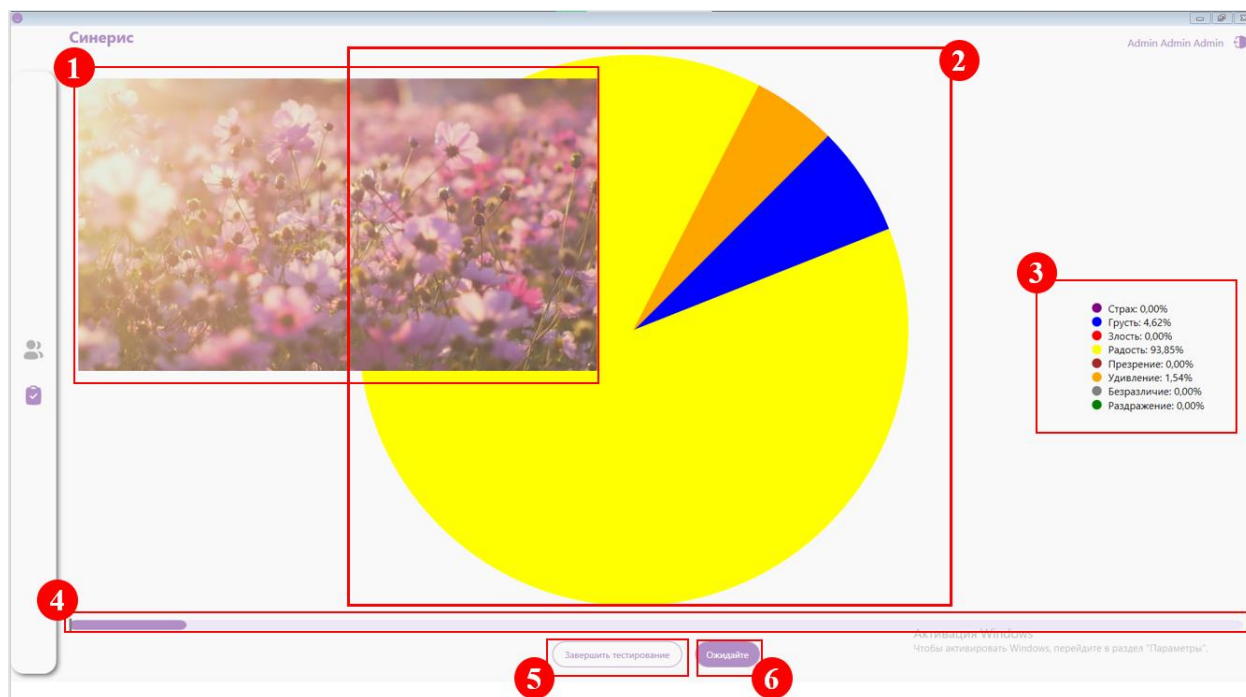

По завершению тестирования нажмите на кнопку «Результат» (7).

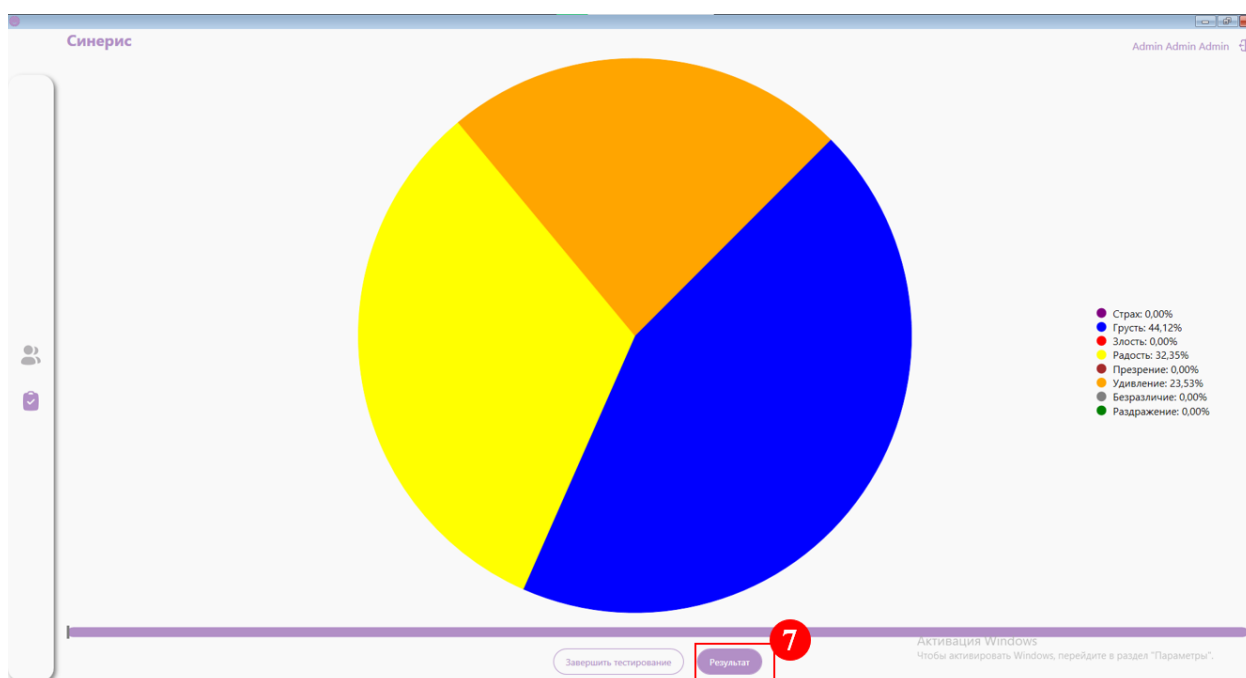


В открывшемся окне «Результат анализа», можно увидеть **результат анализа видеосеанса (8)**. Для сохранения результата, нажмите на кнопку «Сохранить результат» (9).

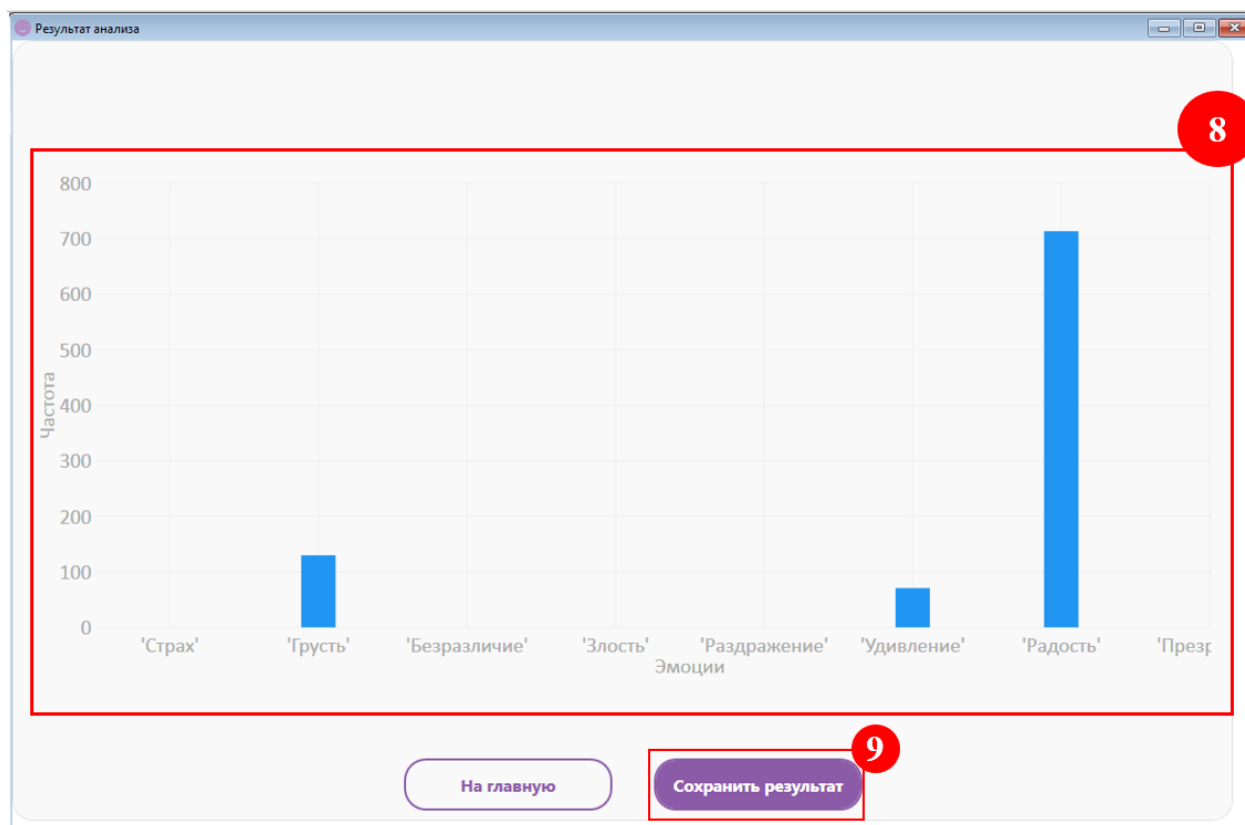


3.2. Аудиотестирование

Для прохождения «Аудиосеанса», перейдите на вкладку «Аудиосенас» (1) и выполните те же шаги, описанные в пункте 3.1.

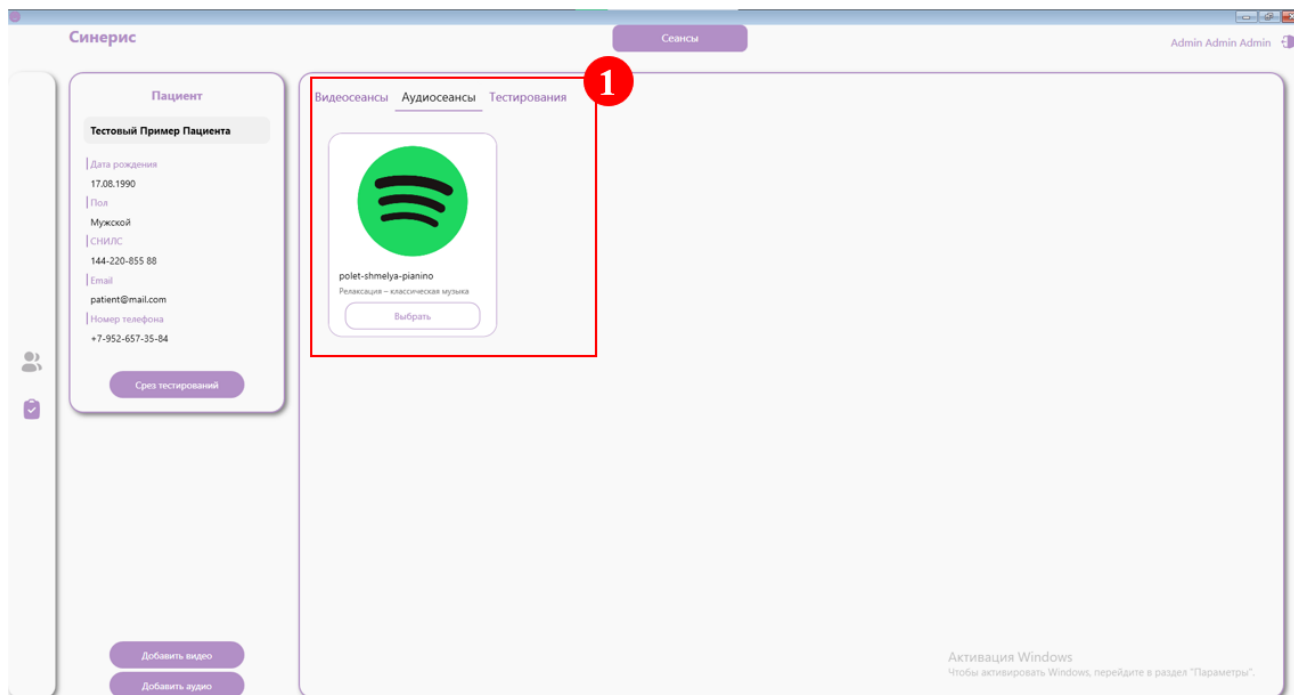


3.3. Тестирование

Для прохождения «Тестирования», перейдите на вкладку «Тестирования» (1) и выполните те же шаги, описанные в пункте 3.1.

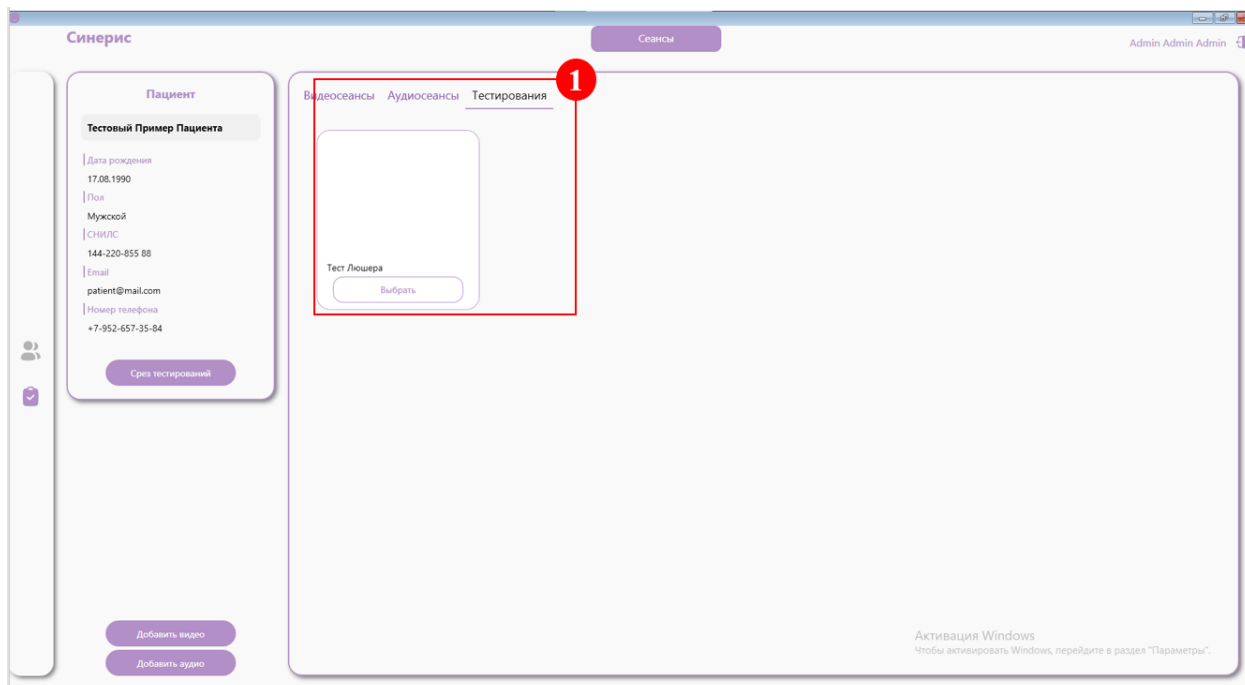


3.4. Карточка пациента

В разделе «Пациент», располагаются личные данные пациента (1) и кнопка «Срез тестирований» (2).

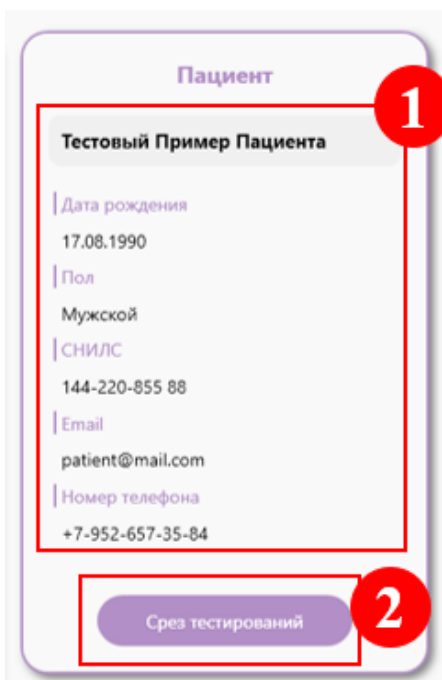


3.4.1. Срез тестирований

Результаты тестирований можно посмотреть, нажав на кнопку «Срез тестирований» (1) в разделе «Пациент».

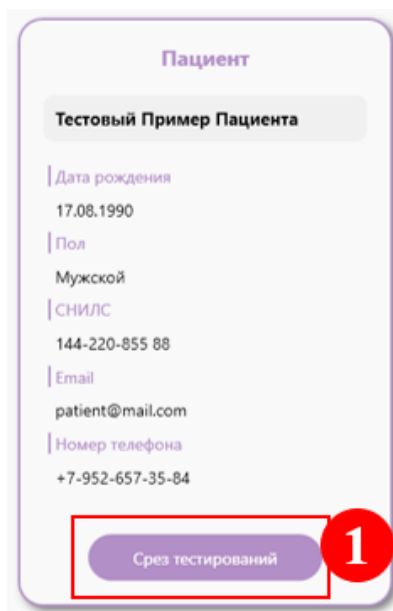


В открывшемся окне «Срез тестирований» располагается:

- Фильтр «Эмоции» (1);
- Фильтр «Дата тестирования» (2);
- Фильтр «Вид графика» (3);
- Результаты распознавания эмоционального состояния по цветам (4);
- Результаты в виде графика (5).

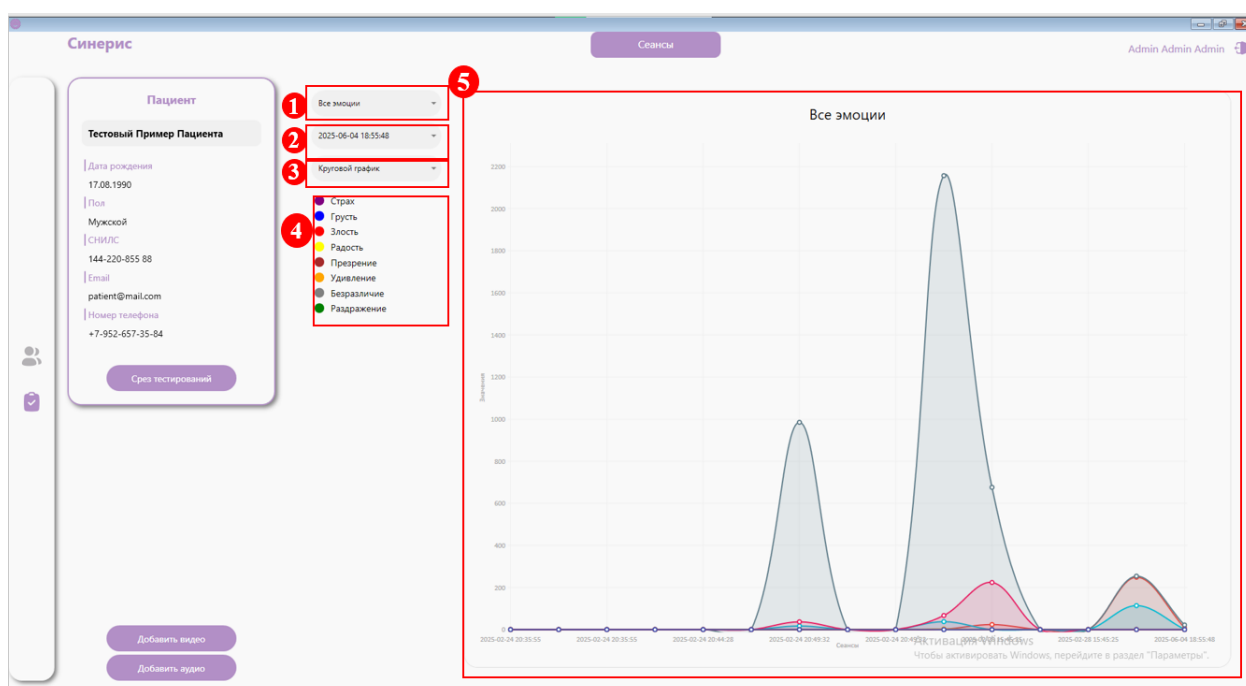


3.5. Добавление видео

Для добавления видео, на вкладке «Сеансы» (1) нажмите на кнопку «Добавить видео» (2).

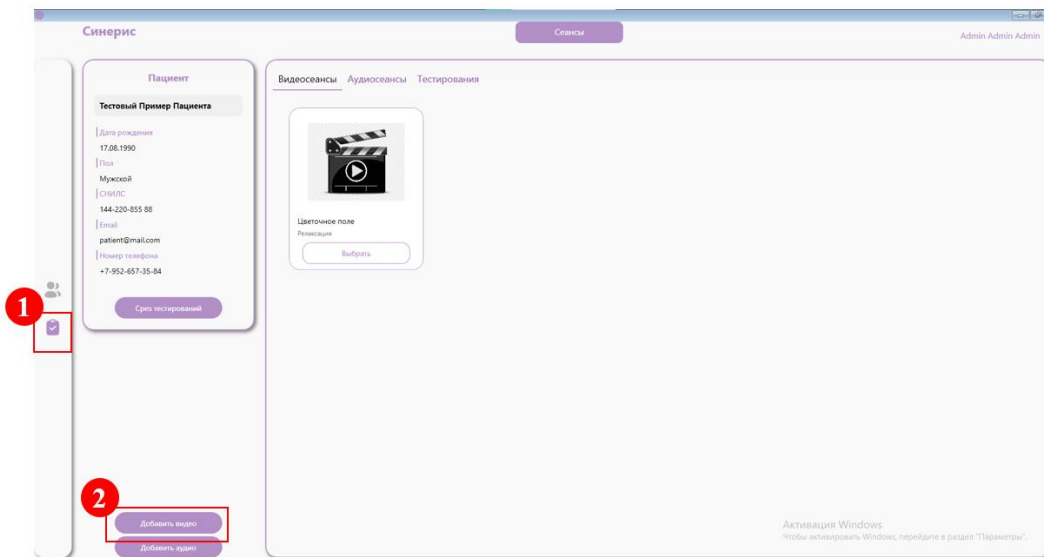


В открывшемся окне «Оценка состояния», заполните следующие разделы:

- **Путь до видео (3)**, нажмите на три точки (...) рядом с полем «Путь до видео» и выберите видеофайл.
- **Название видео (4)**. Введите название видео, которое будет отображаться в системе.
- **Путь до обложки (5)**, нажмите на три точки (...) рядом с полем «Путь до иконки для видео» и выберите изображение обложки.
- **Описание видео (6)**. Кратко опишите содержание видео.
- **Тип видео (7)**. Выберите тип видео из выпадающего списка.
- **кнопка «Добавить» (8)**.

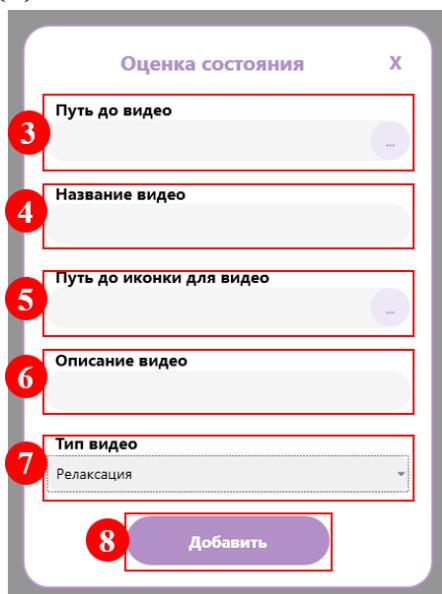

Добавленное видео будет отображаться во вкладке «Видеосеансы» (9).

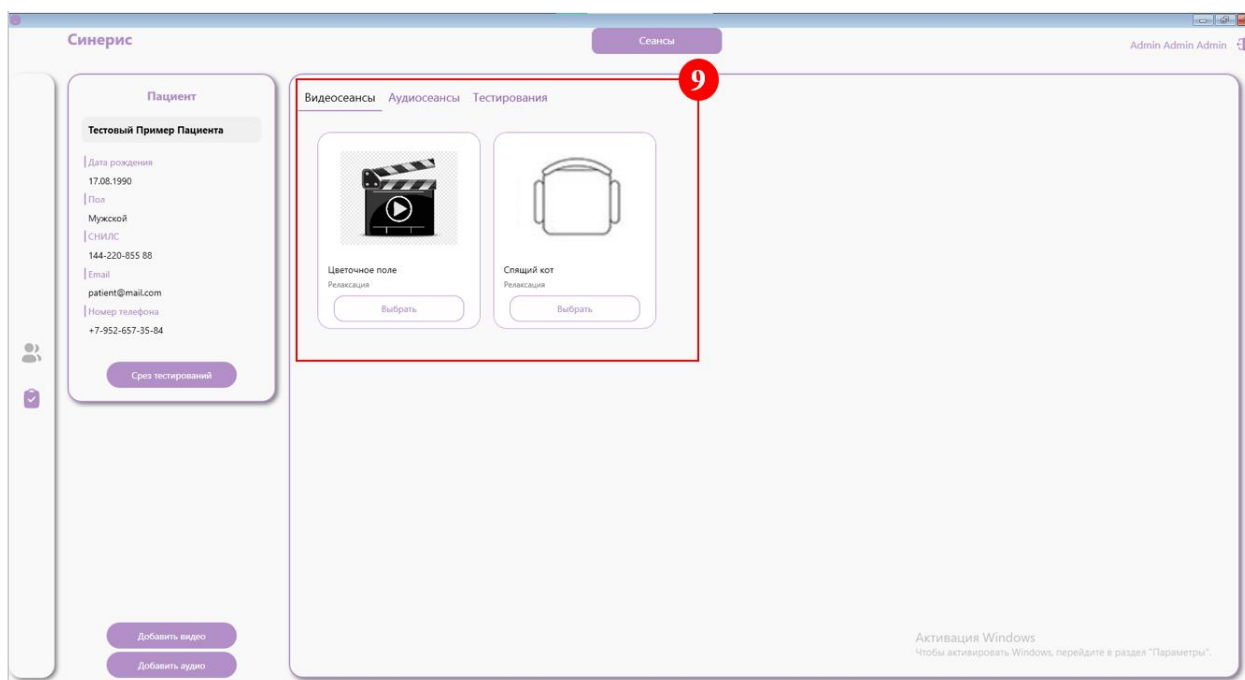

3.6. Добавление аудио

Для добавления аудио, на вкладке «Сеансы» (1) нажмите на кнопку «Добавить аудио» (2) и выполните те же шаги, описанные в пункте 3.5.

