

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Порядок работы врача в системе	3
1.1. Установка десктоп-приложения	3
1.2. Вход в систему	3
1.2.1. Вход в существующий аккаунт:	4
2. Регистрация	5
3. Интерфейс	6
3.1. Пациенты	6
3.1.1. Добавить пользователя	7
3.2. Процедуры	9
3.2.1. Карточка пациента	10
3.2.2. Процедуры	11
3.3. Статистика	14
3.3.1. Таблицы	15
3.3.2. График	15
3.3.3. Рекомендации	16
3.3.4. Кнопка выгрузки результатов	17

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВРАЧА В СИСТЕМЕ


1.1. Установка десктоп-приложения

1. Откройте файл LooperOnlineV1.1_17_04_2025.exe от имени администратора (Правой кнопкой мыши по файлу → «Запустить от имени администратора»)
2. Следуйте советам установщика
3. Если на этапе установки было выбрано поле «создать ярлык на рабочем столе», приложение можно запустить двойным нажатием на иконку «Looper», появившуюся на рабочем столе. В ином случае, исполняемый файл находится по пути «C:\YORD\Looper» под названием «Looper.exe», приложение запускается двойным нажатием на этот файл.
4. При первом запуске приложения введите лицензионный ключ в появившееся поле.

Лицензионный ключ выдается клинике с приобретением веб-приложения «Лупер».


1.2. Вход в систему

Для входа в систему необходимо открыть приложение на рабочем столе 2 раза

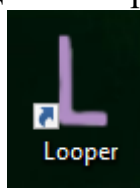


нажать на ярлык приложения

Откроется приложение «Лупер».

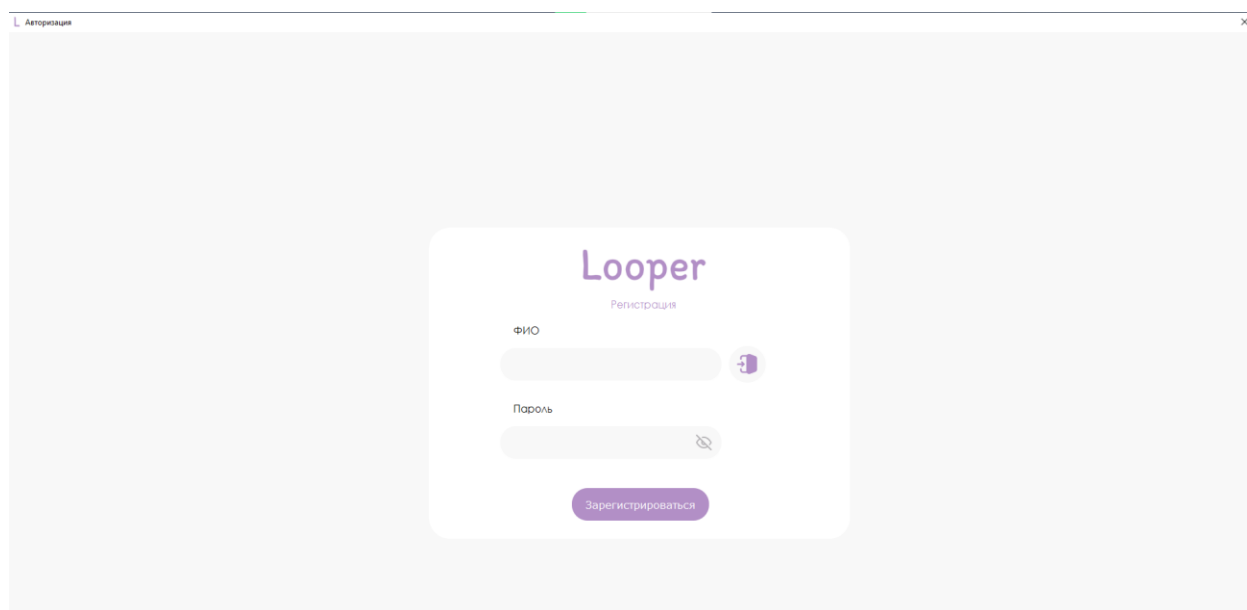


1.2.1. Вход в существующий аккаунт:

Нажмите на значок (1), для входа в существующий аккаунт.

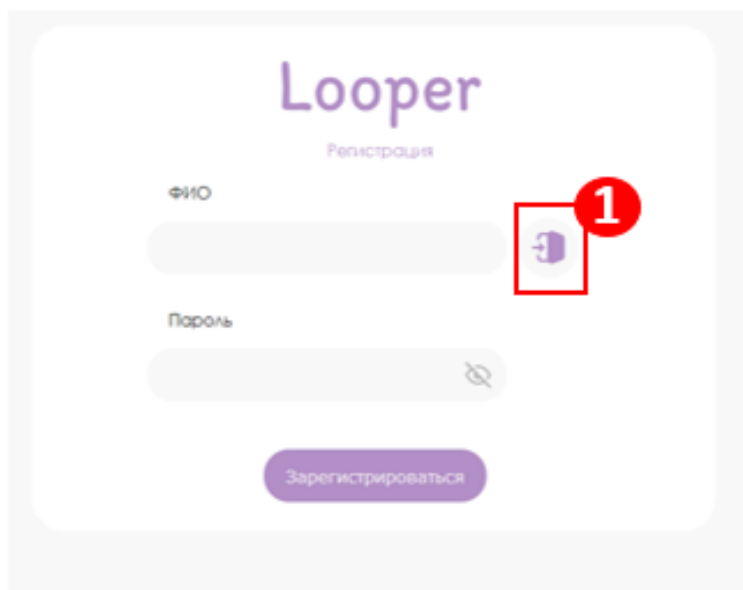


Появится поле для входа в существующий аккаунт:

- 1.1. Необходимо заполнить своё ФИО в поле «ФИО» (2).
- 1.2. Необходимо ввести пароль в поле «Пароль» (3).
- 1.3. После заполнения необходимых полей для входа в систему необходимо нажать «Войти» (4).

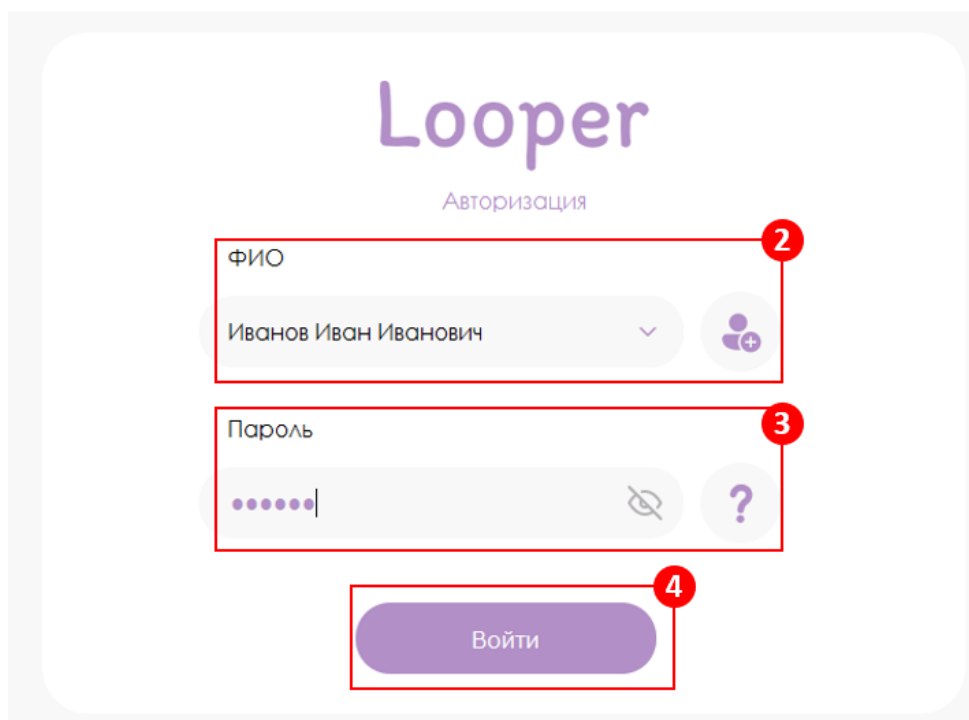


2. Регистрация

1.4. Если у врача нет аккаунта, необходимо нажать «+» (1).

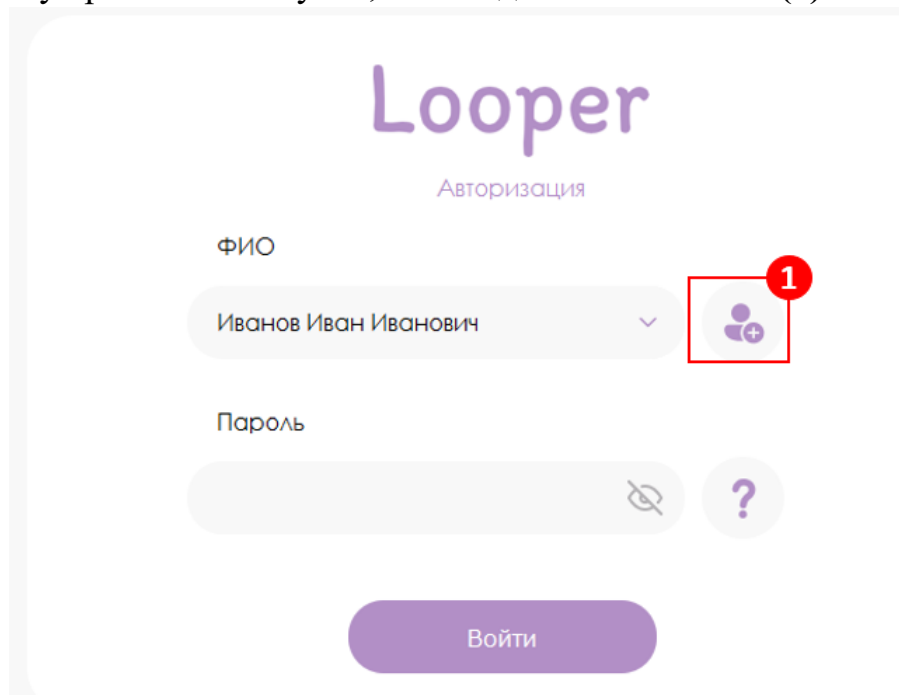

В открывшемся окне необходимо заполнить личные данные:


- ФИО (2);
- Пароль (3);
- Кнопка «Зарегистрироваться» (4).

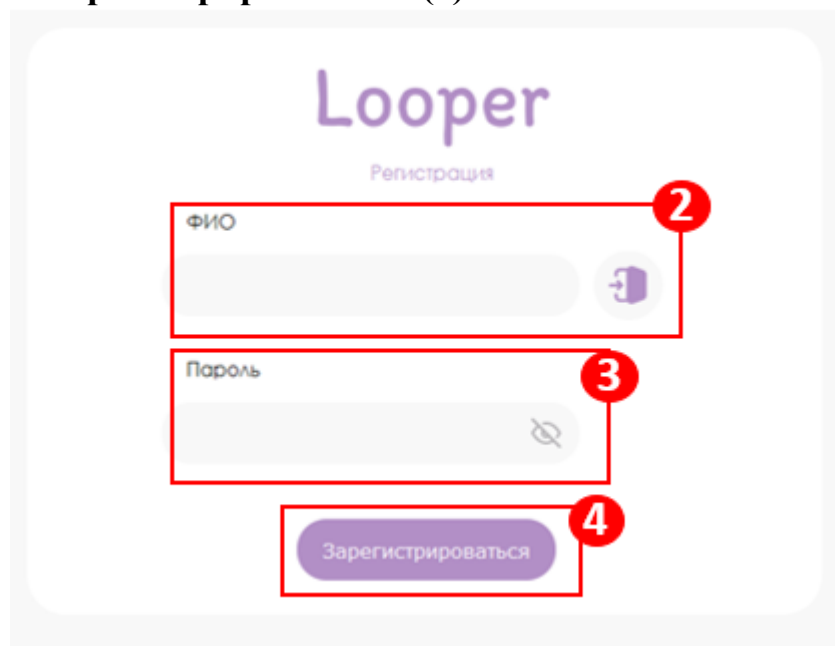

3. Интерфейс


При входе в аккаунт врача, открывается главный экран, в котором располагается:

- Данные врача (1);
- Кнопка «Выход из аккаунта» (2);
- Вкладка «Пациенты» (3);
- Вкладка «Процедуры» (4);
- Вкладка «Статистика» (5).

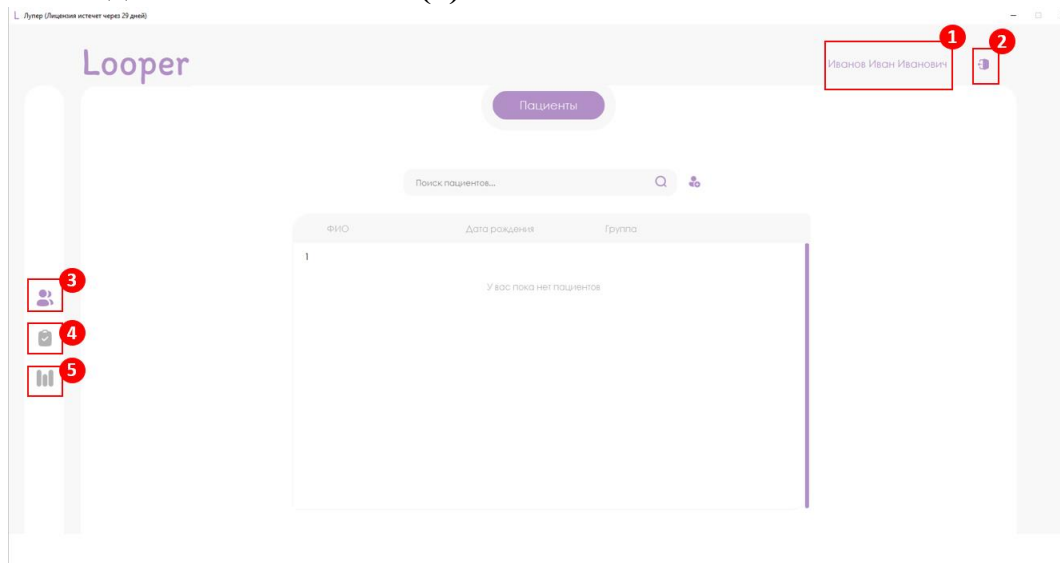


3.1. Пациенты

На Главной, представлен **список (1)** всех пациентов, прикрепленных к врачу.

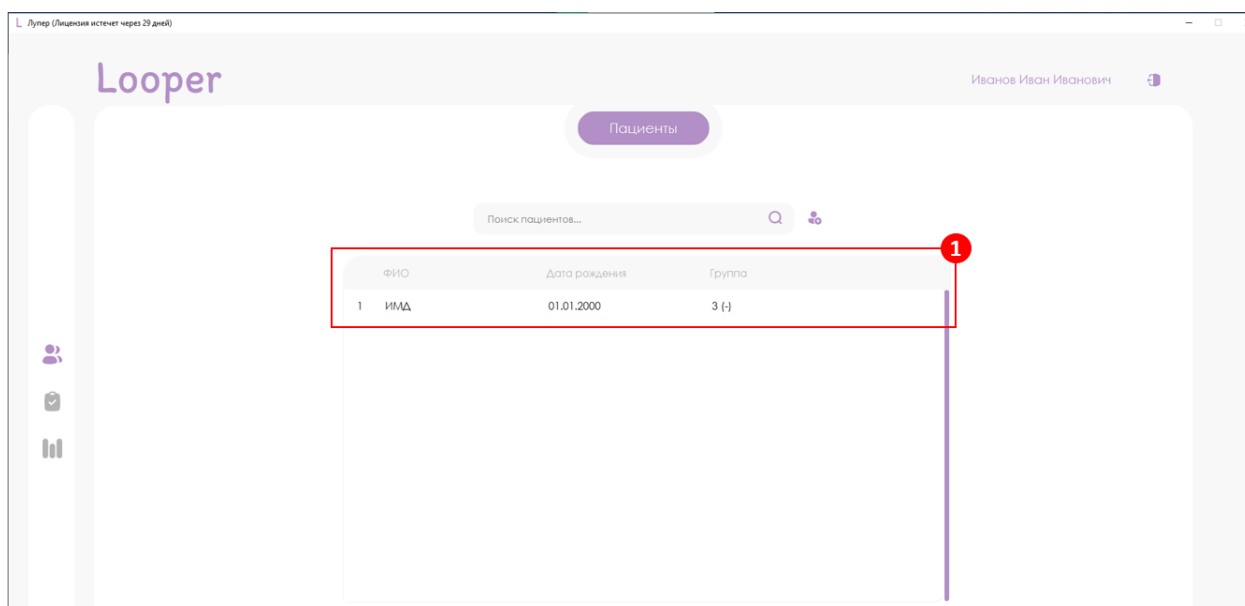

3.1.1. Добавить пользователя

Для добавления нового пациента нажмите на значок «+» (1).

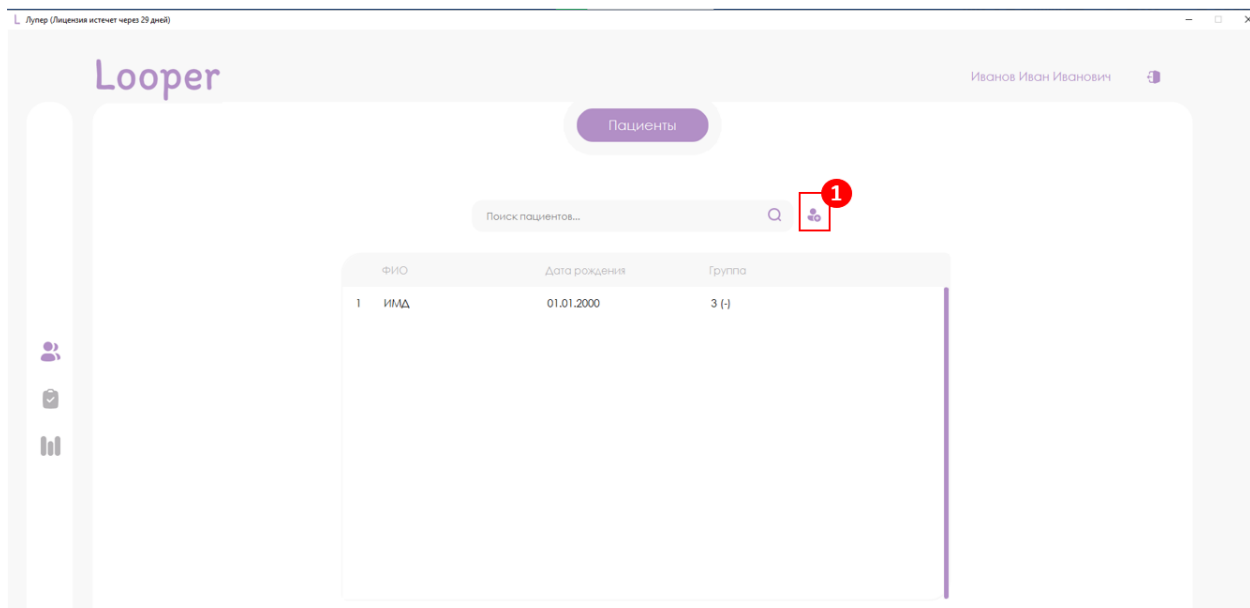

В

открывшемся окне введите данные пациента:

- ФИО (2);
- Дату рождения (3);
- Группу крови (4);
- и нажать кнопку **добавить** (5).

Добавить пациента ✕

2

ФИО

3

Дата рождения

01.01.2000

4

Группа

5

Добавить

После добавления система автоматически добавляет нового пользователя **(6)**:

Looper Иванов Иван Иванович


Пациенты

Поиск пациентов...

	ФИО	Дата рождения	Группа
1	ИМД	01.01.2000	3 (-)
2	Иванов Иван Иванович	01.01.2000	2 +


3.2. Процедуры

Для начала тестирования пациента, нажмите на вкладку **процедуры** (1).

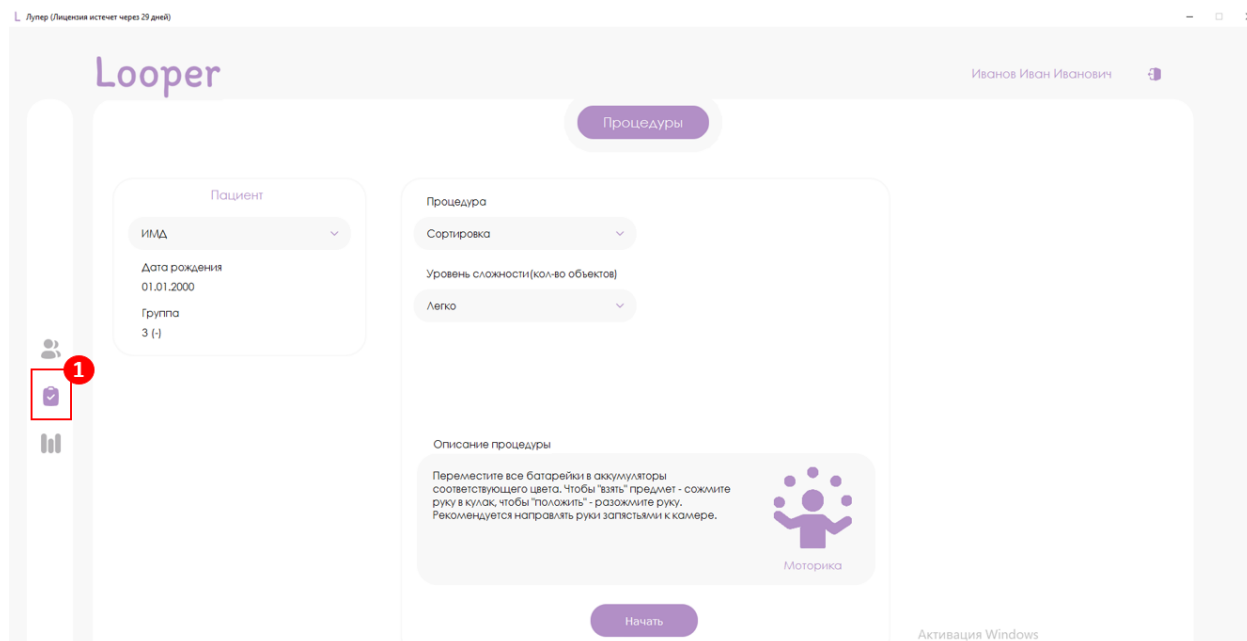

В открывшемся окне располагаются:

- Карточка пациента (2);
- Процедуры (сортировка / шарики / поймай меня / линии / бабочка / футбол / буквы) (3);
- Уровень сложности (легко/средне/сложно) (4);
- Описание процедуры (5);
- Кнопка «Начать» (6).

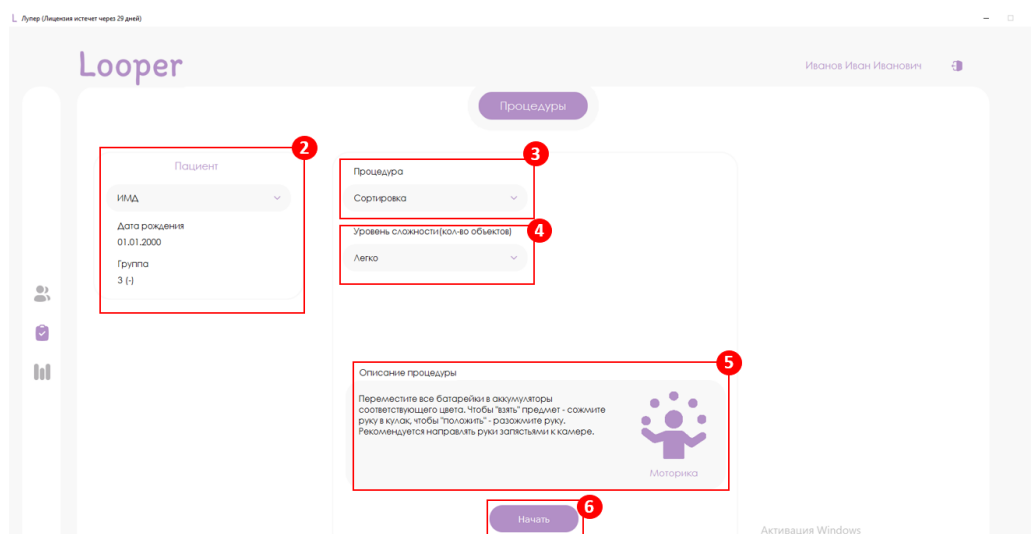

3.2.1. Карточка пациента

В карточке пациента располагается информация:

- Выпадающий список с ФИО пациентов (1);
- Дата рождения (2);
- Группа крови (3).

Пациент

ИМД

Дата рождения
01.01.2000

Группа
3 (-)

1

2

3

Для выбора пациента, необходимо нажать на стрелочку «V» (4):

Пациент

ИМД

Дата рождения
01.01.2000

Группа
3 (-)

4

Выберите нужного пациента из списка (5):

Пациент

Иванов Иван Иванович

ИМД

Иванов Иван Иванович

Группа
2 +

5

3.2.2. Процедуры

Для начала прохождения процедуры, необходимо:

1. Выбрать пациента (смотри пункт 3.2.1. Карточка пациента) **(1)**;
2. Выберите игру в разделе процедуры (сортировка / шарики / поймай меня / линии / бабочка / футбол / буквы) **(2)**;
3. Установите уровень сложности (из выпадающего списка выберите: легко/средне/сложна) **(3)**;
4. Задайте параметры: при выборе какой-либо процедуры, появляются параметры, которые нужно заполнить **(4)**;
5. Внимательно! Прочитайте описание игры, которую выбрали **(5)**;
6. Нажмите кнопку «Начать» **(6)**.
7. После прохождения процедуры, необходимо сохранить результат **(7)**.

Looper (Лицензия истечет через 26 дней)

Looper

Процедуры

1

Пациент

Иванов Иван Иванович

Дата рождения
01.01.2000

Группа
2 +

2

Процедура

Сортировка

Сортировка

Шарики

Поймай меня

Линии

Бабочка

Футбол

Буквы

Описание процедуры

Переместите все батарейки в аккумуляторы соответствующего цвета. Чтобы "взять" предмет - сожмите руку в кулак, чтобы "положить" - разожмите руку. Рекомендуется направлять руки запястьями к камере.

Моторика

Начать

Процедура

Сортировка

3

Уровень сложности(кол-во объектов)

Легко

Легко

Средне

Сложно

Описание процедуры

Переместите все батарейки в аккумуляторы соответствующего цвета. Чтобы "взять" предмет - сожмите руку в кулак, чтобы "положить" - разожмите руку. Рекомендуется направлять руки запястьями к камере.



Моторика

Начать

Looper

Процедуры

Пациент

Иванов Иван Иванович

Дата рождения

01.01.2000

Группа

2 +

Процедура

Шарики

4

Режим отображения:

Обычный

Скорость шаров:

1

Общее кол-во шаров:

20

Шаров одновременно:

3

Описание процедуры

"Поймайте" все появляющиеся шарики на экране. Помимо обычных шариков (зеленого цвета), на экране периодически будут появляться "специальные" шарики - красные, синие и желтые. Красный - при получении убирает все шарики с экрана, они засчитываются как пойманные. Синий - замораживает все объекты на экране на определенное время (они прекращают движение). Желтый - удваивает очки за пойманные



Моторика

Начать

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧА «ЛУПЕР»

Looper (Лицензия истечет через 26 дней)

Иванов Иван Иванович

Процедуры

Пациент

Иванов Иван Иванович

Дата рождения
01.01.2000

Группа
2 +

Процедура

Шарики

Режим отображения:
Обычный

Скорость шаров:
1

Общее кол-во шаров:
20

Шаров одновременно:
3

Описание процедуры

Поймайте все появляющиеся шарики на экране. Помимо обычных шариков (зеленого цвета), на экране периодически будут появляться "специальные" шарики - красные, синие и желтые. Красный - при получении убирает все шарики с экрана, они засчитываются как пойманные. Синий - замораживает все объекты на экране на определенное время (они прекращают движение). Желтый - удваивает очки за пойманные.

Моторика

Начать

Активация Windows

Результаты процедуры

Время выполнения (мин:сек): 0:22

Счет: 200

Оценка выполнения процедуры: 90.9%


Дата/время: 07-07-2025 15:54

Сохранить

Отменить


3.3. Статистика

Для просмотра статистики тестирования пациента, нажмите на вкладку **Статистика (1)**.

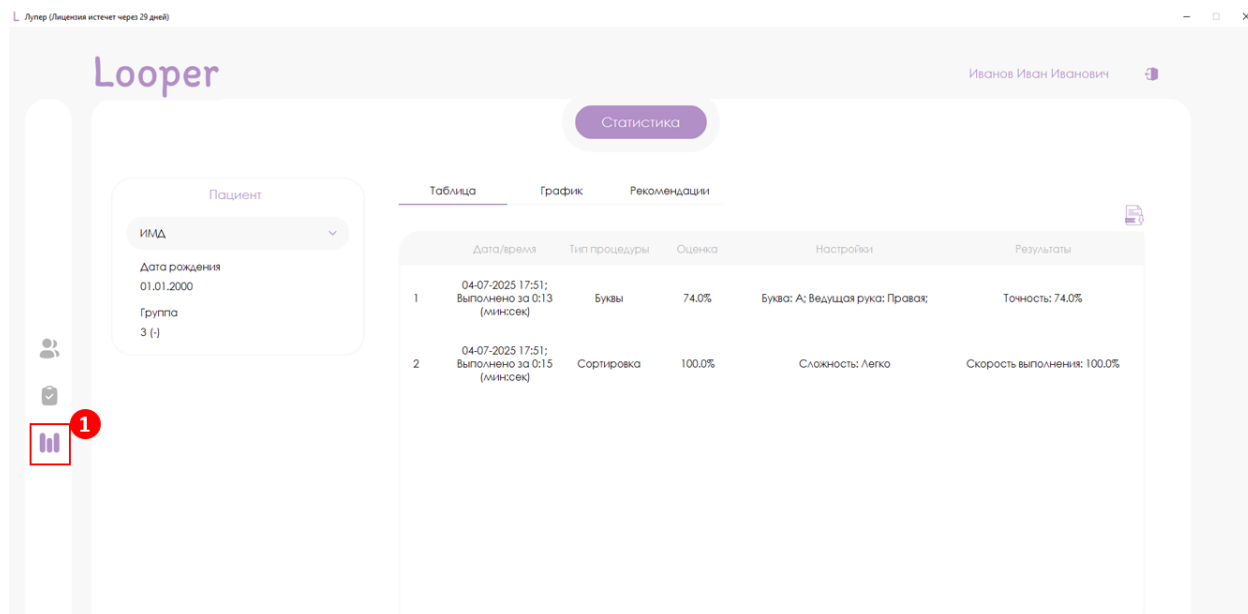


В открывшемся окне располагаются:

- Карточка пациента **(2)** (смотри пункт 3.2.1 Карточка пациента);
- Таблица **(3)**;
- График **(4)**;
- Рекомендации **(5)**;
- Кнопка выгрузки результатов **(6)**.

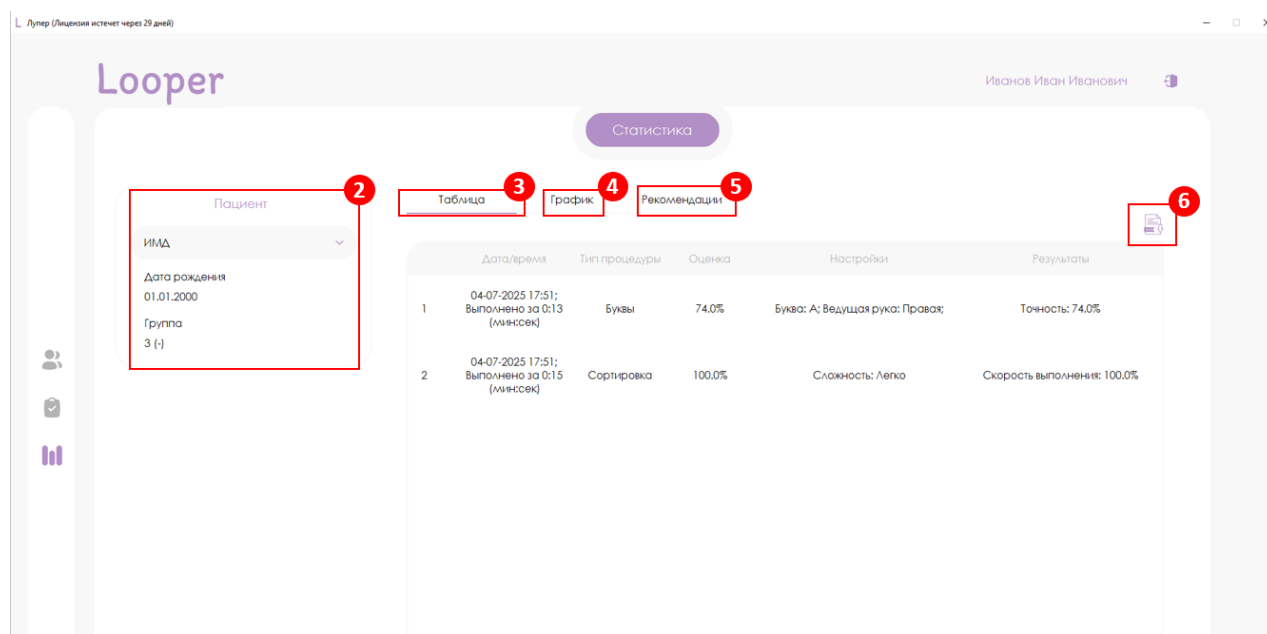

3.3.1. Таблицы

Результаты тестирования можно посмотреть в виде таблицы (1):

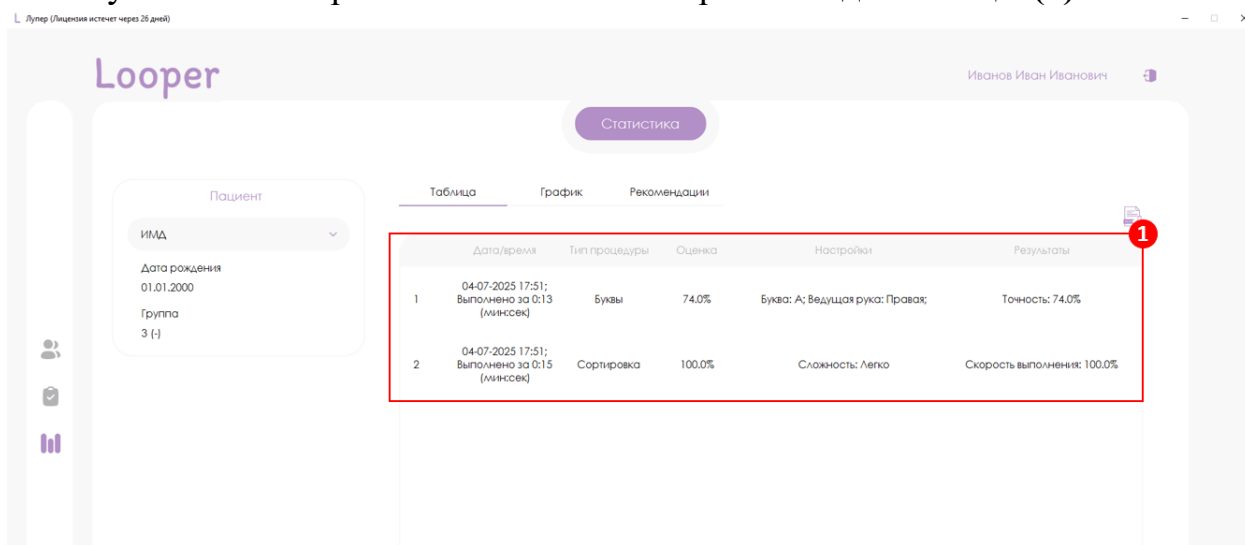


Здесь располагается информация:

- Дата/время;
- Тип процедуры;
- Оценка;
- Настройки;
- Результат.

3.3.2. График

Результаты тестирования можно посмотреть в виде графика, располагается информация:

- Вид процедуры (можно посмотреть результаты как по всем процедурам, так и по отдельным, для этого из выпадающего списка выберите нужное) (1);
- Все время (можно посмотреть результаты как за все время, так и за сегодня/неделю/месяц, для этого из выпадающего списка выберите нужное) (2);
- Вид графика (можно выбрать вид графика: линейный или столбчатый, для этого из выпадающего списка выберите нужное) (3);
- График результатов (4).

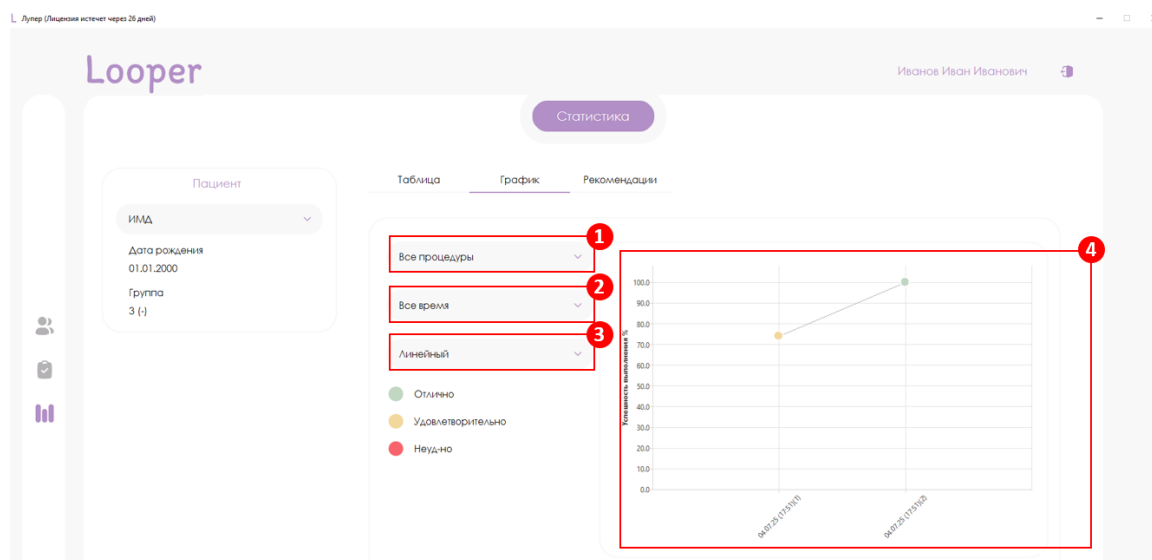


3.3.3. Рекомендации

При выборе вкладки **рекомендации (1)**, можно увидеть рекомендации по видам сенсомоторного развития:

При выборе вида:


- Моторика (3);
- Координация (4);
- Реакция (5).

Сверху появляются окно с рекомендациями для пациента (2).

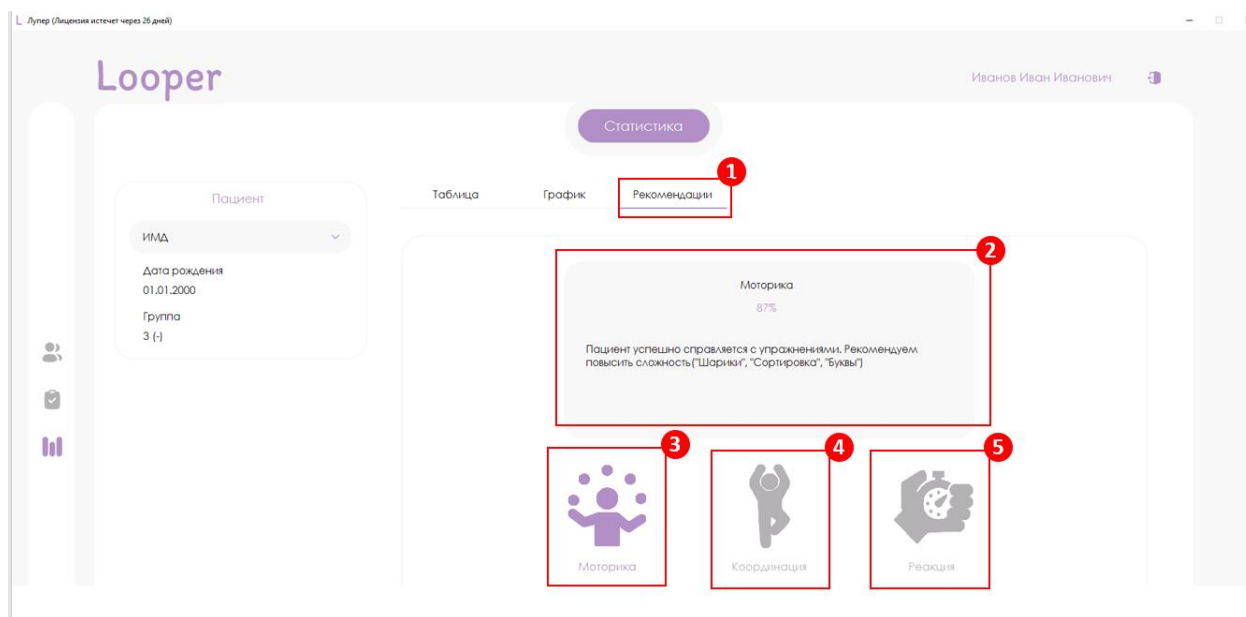


3.3.4. Кнопка выгрузки результатов

Для выгрузки результатов необходимо нажать на кнопку документа (1):

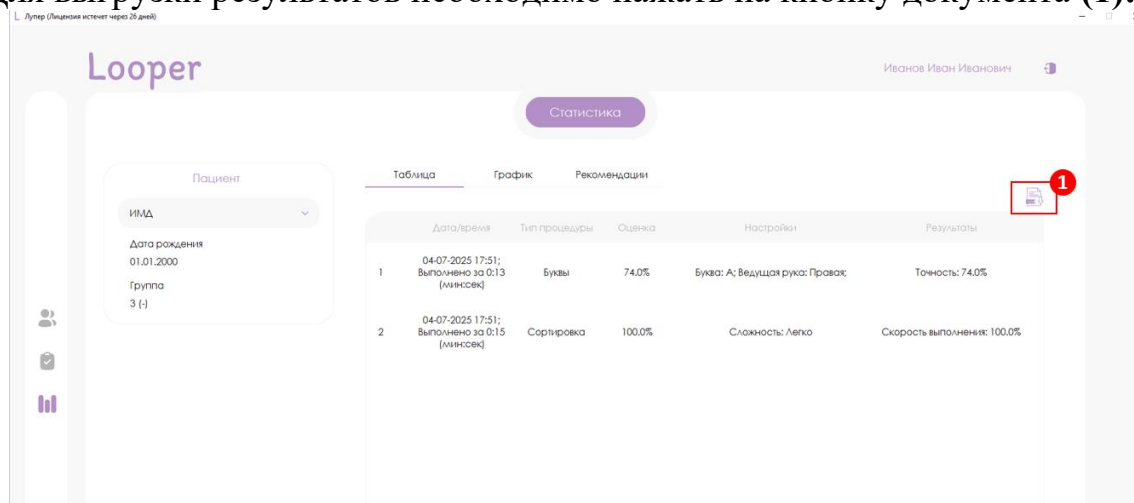

Выберите место куда сохранить данные (2) и нажмите кнопку «Сохранить» (3):

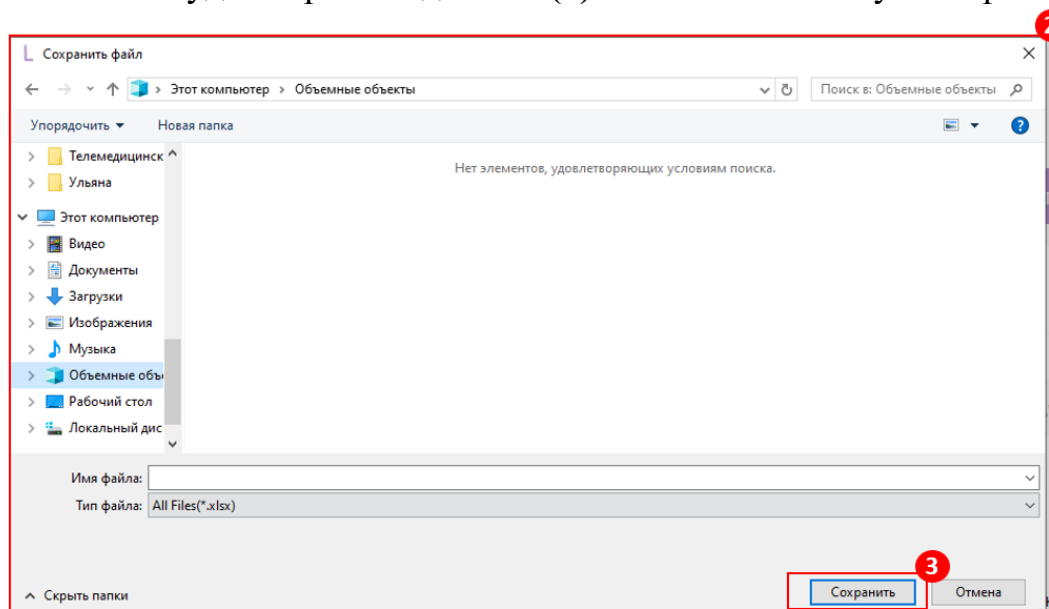

Результаты, полученные после выгрузки, сохраняются в формате (.xlsx), и таблица имеет следующий вид:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Дата/время	Тип процедуры	Оценка	Настройки	Результаты		ФИО Пациента	ИМД		
2	04-07-2025 17:51; Выполнено за 0:13 (мин:сек)	Буквы	74.0%	Буква: А; Ведущая рука: Правая;	Точность: 74.0%		Дата рождения	01.01.2000		
3	04-07-2025 17:51; Выполнено за 0:15 (мин:сек)	Сортировка	100.0%	Сложность: Легко	Скорость выполнения: 100.0%		Группа	3 (-)		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										